


Tirette d'appel et d'annulation avec système de protection contre l'arrachement.

REF : NPWU3-BFEA

Ancienne réf : TC116300B

ascom

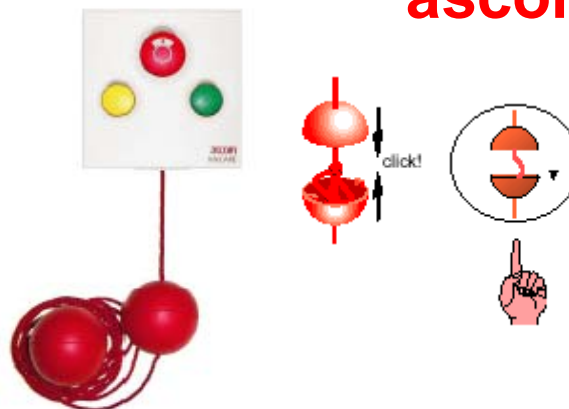

Description.

Unité d'appel murale équipée de 3 boutons.

Utilisation système :

**teleCARE SB, teleCARE SC teleCARE M
teleCARE WL** (lorsque l'unité est raccordée à une unité d'appel radio)

Cette unité comprend :

- un large bouton rouge, avec un symbole infirmière, appel patient
- un cordon d'une longueur réglable jusqu'à 2M et équipé de sphères permettant de déporter le cordon de 2,5 cm du mur pour une meilleure préhension.
- un bouton vert, annulation d'appel réservé au personnel de soins.
- un bouton jaune, également réservé au personnel de soins.

Elle s'installe à l'aide d'une plaque de fixation qui offre l'avantage de s'adapter sur la plupart des coffrets standards d'encastrement.

Une entretoise de fixation est également disponible pour un montage en saillie.

Quel que soit le besoin, la plaque ou l'entretoise de fixation est à commander séparément.

Accessoires complémentaires :

- Plaque de fixation **R281145 (TC811100B)**
- Entretoise de fixation **R281149 (TC811150B)**
- Cordon avec sphère **R281328**

Fonctions configurables (suivant système) :

Les fonctionnalités des boutons rouge et jaune sont paramétrables à l'aide de plots à souder sur le circuit imprimé.

Ceci permet d'affecter à ces boutons, suivant les applications, les sorties SET /RESET ou R+S.

Fonctions disponibles.



Appel normal



Annulation d'appel / Appel d'urgence / Présence



Annulation d'appel / Appel d'urgence / Présence / Appel d'assistance / Présence 2

A noter :

Lorsqu'une traction trop importante est effectuée sur le cordon, une des deux sphères se désolidarise évitant ainsi l'arrachement du cordon et du mécanisme de l'unité.

L'appel d'urgence s'effectue en exerçant une pression de 3 secondes sur le bouton vert de l'unité.

Chaque bouton possède son propre voyant. Ces voyants restent en permanence faiblement éclairés pour que l'unité puisse être facilement repérée dans l'obscurité. Lorsqu'une fonction est sollicitée (appel normal, présence, assistance...) le circuit active alors une lumière vive de confirmation ou de tranquillisation.

Note: Version après 06-2008 bornier détachable, montage câble par pression
Référence du bornier détachable: NICT- 4AA Connecteur 4 points

Caractéristiques Techniques

Boîtier :	ABS, blanc
Dimensions avec plaque de fixation :	91x91x17mm (L x h x P)
Dimensions avec entretoise :	91x91x40mm (L x h x P)
Voyants de tranquillisation :	Led électroluminescente
Tension d'utilisation :	24V/DC (de 18V/DC à 30V/DC)
Consommation :	4.5mA (mini) 18 mA (maxi) 1 x LED on 31mA (maxi) 2 x LED on 44mA (maxi)= 3 x LED on
Connexions :	Par connecteur 2 x 4 points pour des fils de 0.6 mm Ø
Environnement :	0 - 40°C / 80% humidité
Standards et certification :	CE, IP 40
Marquage usine :	NPWU3-BFEA